

EL-7pro eyeporation (face)

施術時間目安：10分

イーエルセブンプロ アイポレーション

全顔 (10分) フェイスラインの引締め、目元のハリ。

1



3GF Essence Proを塗布

2 口元



口角
▼ (往復)
A 鼻下

口角
▼ (往復)
B 口元

3 フェイスライン




顎先
▼ (クルクル)
こめかみ

4 頬




口角・鼻側面
▼ (クルクル)
こめかみ

5 額

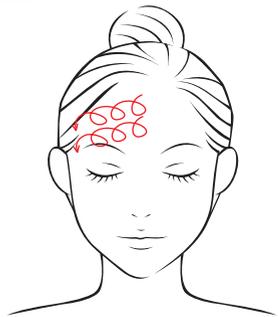

額の中心
▼ (クルクル)
こめかみ


6 目元周り

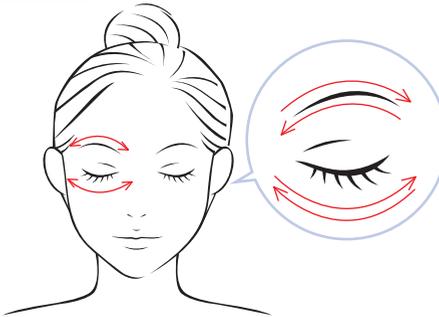

目尻
▼
目頭

眉尻
▼
眉頭
▼
※目元周りは優しく

7 鼻

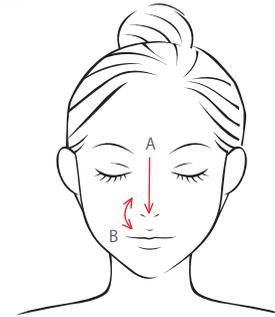

鼻根部
▼
A 鼻尖

B 小鼻

POINT

- ◆最初は電圧を1番弱くしてスタートし、徐々に電圧を調整して下さい。
 - ※刺激を感じると有効成分が導入されにくい場合があります。
 - ※電圧が弱くても有効成分は導入されます。
- ◆肌に圧をかけたり引き上げたりせず、お顔全体にまんべんなくゆっくり当てる方が効果的です。
- ◆美容液の塗布量が少なく滑りが悪くお肌に刺激を与えるため、塗布量は多めにして下さい。
- ◆お肌に塗布した美容液が少なくなってきたら追加して下さい。